

Disinfezione e colata

Le impronte possono essere disinfettate con le normali soluzioni disinfettanti.

La colata dell'impronta può essere effettuata 30 minuti dopo averla tolta dalla bocca. Non vi sono altri limiti di tempo.

L'impronta dovrà essere conservata a temperatura ambiente (max. 25 °C).

Le impronte possono essere placcate in rame o in argento.

Pericoli, precauzioni di sicurezza ed eventuali

effetti secondari

- Non sono noti effetti secondari. Non può essere esclusa, in certi casi, la possibilità che pazienti particolarmente predisposti presentino reazioni di ipersensibilità verso alcuni componenti del materiale.
- Non usare guanti di lattice! Si raccomanda l'uso di guanti di PVC o di polietilene.
- Non miscelare con materiali da impronta a presa per condensazione o di polietere.
- Non scambiare i cucchiai né i coperchi dei contenitori!

Composizione

Polivinilsilossani a presa per addizione, diossido di silicio, coloranti alimentari, additivi, catalizzatore al platino.

Classificazione

Ottempera ai requisiti della norma ISO 4823, tipo 0: consistenza molto alta – stucco.

Conservazione e vita scaffale

Non usare dopo la data di scadenza.

Conservare a < 25 °C.

Proprietà

	Putty
Tempo di miscelazione	0:30 min
Tempo totale di lavorazione (compr. tempo di miscelazione)	1:30 min
Tempo di permanenza in bocca	3:30 min
Cambio dimensionale (24 h)	< 0,4 %
Cedimento da compressione	< 0,7 %
Deformazione da compressione	< 2,5 %
Durezza Shore A (24 h)	< 75

I tempi citati si riferiscono a una temperatura ambiente di 23 °C e a un normale tasso di umidità del 50%. A temperature maggiori, questi tempi si riducono, e a temperature minori si prolungano.

Confezioni

SternVantage® Putty
2 contenitori @ 400 g di pasta

REF 220001

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Solo per uso odontoiatrico!

Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Non riutiliz- zare		Utilizzare entro il YYYY-MM- DD o YYYY-MM
	Numero di lotto		Fabbricante
	Sterilizzato mediante ir- radiazione		Simbolo per “Non sterile”
	Simbolo per “Solo su prescrizione medica”		Attenzione, consultare la documen- tazione allegata
	Numero di catalogo		

Prodotto in Germania per:



Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1.508.226.5660



ESPANOL

INSTRUCCIONES DE USO

Información general

Material de impresión preciso y maleable que se basa en siliconas de vinilo de fraguado por adición. Tiene propiedades hidrófilas y es compatible con las superficies húmedas. Es fácil de mezclar y no es pegajoso. SternVantage® Putty está indicado para impresiones preliminares o la técnica de doble impresión con un Wash-material de silicona de baja viscosidad.

Procedimientos recomendados

Usar pasta base y pasta catalizadora a partes iguales en volumen o peso (a temperatura ambiente y humedad normal). Coger la pasta base con la cuchara de color y la pasta catalizadora con la cuchara blanca. Amasar los componentes con la punta de los dedos durante unos 45 segundos hasta que el color sea homogéneo. ¡Cerrar los depósitos inmediatamente después de su uso!

Toma de impresión

Para mejorar la adhesión a la cubeta, tanto si está perforada como si no lo está, puede aplicarse una fina película de un adhesivo. Dejar secar durante 3:00 minutos. El material amasado se carga a la cubeta preparada. Introduzca la cubeta cargada en la boca del paciente antes de que transcurran 1:45 minutos tras el inicio de la mezcla. La cubeta deberá permanecer en la boca del paciente durante 3:30 minutos como mínimo. Después podrá retirarse la cubeta.

Desinfección y colado

Las impresiones pueden desinfectarse con las soluciones de desinfección habituales.

La impresión puede verse 30 minutos después de su retirada de la boca. No existen otras limitaciones temporales.

La impresión debe almacenarse a temperatura ambiente (máx. 25 °C).

Las impresiones pueden chaparse en cobre o plata.

Peligros, precauciones de seguridad y posibles efectos secundarios

- Se desconocen efectos secundarios. No puede excluirse la posibilidad de que, en determinados casos, los pacientes propensos puedan desarrollar una hipersensibilidad frente a algunos componentes del material.

- ¡No usar guantes de látex! Se recomienda usar guantes de PVC o polietileno.
- No mezclar con materiales de impresión de fraguado por condensación o de tipo poliéter.
- ¡No intercambiar ni las cucharas ni las tapas de los depósitos!

Composición

Polisiloxanos de fraguado por adición, dióxido de silicio, colorantes alimentarios, aditivos, catalizador de platino.

Clasificación

Cumple con los requisitos de ISO 4823, tipo 0: consistencia muy alta – masilla.

Almacenamiento y vida en almacenamiento

No usar después de la fecha de caducidad.

Almacenar a < 25 °C.

Propiedades

	Putty
Tiempo de mezclado	0:30 min
Tiempo total de operación (incl. tiempo de mezclado)	1:30 min
Tiempo en la boca recomendado	3:30 min
Cambio de dimensiones (24 h)	< 0,4 %
Fraguado por compresión	< 0,7 %
Deformación por compresión	< 2,5 %
Dureza Shore A (24 h)	< 75

Los tiempos mencionados son válidos a temperatura ambiente (23 °C) y una humedad normal del 50%. A mayor temperatura, se acortan estos tiempos y a menor temperatura se prolongan.

Presentación

SternVantage® Putty
2 depósitos de 400 g de pasta

Order Number 220001

¡Manténgase fuera del alcance de los niños!

¡Sólo para uso dental!

Simbolo	Usado para	Simbolo	Usado para
	No reusar		Fecha de vencimiento YYYY-MM- DD o YYYY-MM
	Código de lote		Fabricante
	Esterilizado con irradi- ación		Símbolo de no estéril
	Símbolo para “Uso exclusivo con receta médica”		Atención, consulte los documentos adjuntos
	Número de catálogo		

Fabricado en Alemania para:



Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1.508.226.5660

