

Composizione
Polivinilsilossani a presa per addizione, diossido di silicio, coloranti alimentari, additivi, catalizzatore al platino.

Pericoli, precauzioni di sicurezza ed eventuali effetti secondari
Non sono noti effetti secondari. Non può tuttavia essere esclusa, in certi casi, la possibilità che pazienti particolarmente predisposti presentino reazioni di ipersensibilità verso alcuni componenti del materiale.

Conservazione e vita scaffale
Non usare dopo la data di scadenza.
Conservare a ≤ 25°C (77°F).

Proprietà	
Indurimento	
Tempo totale di lavorazione	2:15 min
Tempo di permanenza in bocca raccomandato	3:30 min
Cambio dimensionale (24h)	≤ 0,4%
Cedimento da compressione	≤ 0,4%
Deformazione da compressione	≤ 3,5%
I tempi citati si riferiscono a una temperatura ambiente di 23°C/74°F e a un normale tasso di umidità del 50%. A temperature maggiori, questi tempi si riducono, e a temperature minori si prolungano.	

Confezioni	
SternVantage® Light Body 2 cartucce da 60 g di pasta, 12 beccucci miscelatori, 12 beccucci intraorali	REF 220101
Beccucci miscelatori Sacchetto da 50 unità	REF 220163

Tenere fuori dalla portata dei bambini! Solo per uso odontoiatrico!

Simbolo	Usato per	Simbolo	Usato per
	Non riutilizzare		Utilizzare entro il YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Numero di lotto		Fabbricante
	Sterilizzato mediante irradiazione		Simbolo per "Non sterile"
	Simbolo per "Solo su prescrizione medica"		Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Numero di catalogo		

Prodotto in Germania per:


SternGold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703 USA
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660



ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

Información general

Material de impresión tixotrópico de precisión con una viscosidad baja basado en siliconas de vinilo de fraguado por adición. Se suministra en cartuchos de mezcla automática y puede extrusionarse directamente en los dientes o en la cubeta. Tiene propiedades hidrófilas, con lo que mejora su humeatabilidad y ofrece una mejor reproducción de las zonas subgingivales. SternVantage® Light Body es tixotrópico, por lo que conserva su posición en la cubeta, pero es fluido bajo presión. SternVantage® Light Body se presenta en prácticos cartuchos de mezcla au-tomática.

Indicaciones

Material de impresión y corrección para técnicas de impresión de fase doble (en dos pasos) o de dos fases (en un paso) junto con productos como SternVantage® Putty.

Procedimientos recomendados

- Se carga la cubeta con el material mezclado automáticamente o se aplica directamente a los dientes. Para extrusionar directamente en los dientes, usar boquillas intraorales.
- Introducir la cubeta en la boca del paciente antes de que transcurran 2:00 minutos (fraguado normal) tras la ex-trusión.
- Mantener la posición durante 3:30.

Tiempos mencionados para 23°C/74°F.

Desinfección y colado

- Las impresiones pueden desinfectarse con las soluciones de desinfección habituales.
- La impresión puede verse 30 minutos después de su retirada de la boca. No existen otras limitaciones temporales.
- La impresión debe almacenarse a temperatura ambiente normal (≤ 25°C/77°F).
- Las impresiones pueden chaparse en cobre o plata.

Información complementaria

- Cumple con los requisitos de ISO 4823, tipo 3, consistencia baja – viscosidad baja.
- No mezclar con materiales de impresión de fraguado por condensación o de tipo poliéter.

Composición

Polisiloxanos de fraguado por adición, dióxido de silicio, colorantes alimentarios, aditivos, catalizador de platino.

Peligros, precauciones de seguridad y posibles efectos secundarios

Se desconocen efectos secundarios. No puede excluirse la posibilidad de que, en determinados casos, los pacientes propensos puedan presentar una hipersensibilidad frente a algunos componentes del material.

Almacenamiento y vida en almacenamiento

No usar después de la fecha de caducidad.
Almacenar a ≤ 25°C (77°F).

Propiedades

Fraguado	
Tiempo total de operación	2:15 min
Tiempo en la boca recomendado	3:30 min
Cambio de dimensiones (24h)	≤ 0,4%
Fraguado por compresión	≤ 0,4%
Deformación por compresión	≤ 3,5%

Los tiempos mencionados son válidos a temperatura ambiente (23°C/74°F) y una humedad normal del 50%. A mayor temperatura, se acortan estos tiempos y a menor temperatura se prolongan.

Presentación

SternVantage® Light Body 2 cartuchos de 60 g de pasta, 12 boquillas de mezclado, 12 boquillas intraorales	REF 220101
Boquillas de mezclado Bolsa de 50	REF 220163

¡Manténgase fuera del alcance de los niños! ¡Sólo para uso dental!

Simbolo	Usado para	Simbolo	Usado para
	No reusar		Fecha de vencimiento YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Código de lote		Fabricante
	Esterilizado con irradiación		Simbolo de no estéril
	Simbolo para "Uso exclusivo con receta médica"		Atención, consulte los documentos adjuntos
	Número de catálogo		

Fabricado en Alemania para:


SternGold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703 USA
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660

