



Duplicating Material

DEUTSCH

GEBRAUCHSINFORMATION

Allgemeine Informationen

SternTek® Dubliermaterial ist ein gießbares Dubliermaterial auf Silikonbasis, das sich durch hohe dimensionale Genauigkeit und präzise Detailreproduktion auszeichnet. Seine hohe Elastizität und Reißfestigkeit garantiert zudem das problemlose Entfernen des Modells vom SternTek® Dubliermaterial. Die hervorragende Detailreproduktion und Dimensionsstabilität der mit SternTek® Dubliermaterial hergestellten Gießformen gewährleisten optimale Dublier-Ergebnisse, selbst noch nach Monaten oder mehreren Gießverfahren.

SternTek® Dubliermaterial entspricht den Anforderungen von ADA-Spez. Nr. 20, ISO 4823:1992, Typ 3

Vorteile

- Selbst feinste Details bleiben erhalten
- Mischverhältnis 1:1
- Extreme Präzision
- Bleibt nicht an Metall kleben
- Hohe Reißfestigkeit
- Mit Druckluft ablösbar
- Hohe Elastizität
- Gießformen können trocken aufbewahrt werden

Indikation

Zur Herstellung von Gips- und Einbett-Duplikatmodellen.

Empfohlene Verwendung

1. Das Modell in eine reguläre Dublierkuvette geben. Das Modell sollte Raumtemperatur haben und darf vor dem Dublieren nicht in Wasser eingeweicht werden.
2. Die Flaschen mit SternTek® Dubliermaterial vor Gebrauch gründlich schütteln. Katalysator und Base im Verhältnis 1:1 ca. 30 Sekunden lang mischen, bis das Material eine gleichmäßige, homogene Farbe hat. SternTek® Dubliermaterial ist speziell für manuelles Anmischen geeignet, es wird jedoch die Verwendung eines Vakuummischers empfohlen, um eine konsistente Qualität der Dublierformen sicherzustellen. Je nach Größe des Modells werden ca. 100 g bis 200 g Dubliermaterial pro Dublierung empfohlen.
3. Das Dubliermaterial innerhalb von 4 Minuten in einem dünnen Strom stets auf denselben Modellbereich gießen.
4. Das Modell kann nach einer Abbindezeit von 30 Minuten aus der Form genommen werden.
5. Die Dublierform weitere 30 Minuten stehenlassen, ehe standardmäßiges Gips- oder Einbettmaterial eingegossen wird, damit sich etwaige beim Entfernen des Modells aufgetretene Deformationen im elastischen Material ausgleichen können. Bitte die entsprechenden Herstelleranweisungen beachten. Falls die Dubliermodelle mehrmals verwendet werden, zwischen den einzelnen Dublierverfahren mindestens 30 Minuten warten.

Bitte beachten

- SternTek® Dubliermaterial muss vor der Verwendung gründlich geschüttelt werden.
- Die Kappen sind farbkodiert (Katalysator weiß, Base rot) um ein Verwechseln und eine Kontamination des Flascheninhalts zu vermeiden.

Wechselwirkungen

Nicht zusammen mit kondensationsvernetztem Silikon verwenden.

Kontakt mit organischen Lösungsmitteln oder Lösungsmittel enthaltenden Flüssigkeiten vermeiden, da sonst eine Expansion des Materials nicht auszuschließen ist, was zu Ungenauigkeiten führen kann. SternTek® Dubliermaterial nicht in der Nähe von Lösungsmitteln oder flüchtigen Monomeren aufbewahren, da eine Absorption der Dämpfe zu Expansion führen kann.

Nicht mit Latex-Handschuhen anwenden.

Nebenwirkungen

Bislang sind keine Nebenwirkungen bekannt. In einzelnen Fällen ist eine Überempfindlichkeit gegenüber Materialkomponenten nicht auszuschließen.

Technische Daten

Regulär abbindend	Mischverhältnis	1:1
	Mischdauer	30 Sek.
	Bearbeitungszeit	4 Min.
	Abbindezeit	30 Min.

Zusammensetzung

Vinylsiloxan, Silikondioxid, Pigmente, Zusatzstoff, Platinkatalysator.

Aufbewahrung

Bei normaler Raumtemperatur (15 – 25 °C) trocken aufbewahren. Nur bis zum Verfallsdatum verwenden.

Verpackung

Regulär abbindend

SternTek® Dubliermaterial, regulär abbindend

2 Flaschen (Katalysator und Base)

je 1 l

Art.-Nr. 222011

SternTek® Dubliermaterial, regulär abbindend

2 Flaschen (Katalysator und Base)

je 5 l

Art.-Nr. 222012

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

Achtung: US-Bundesgesetze beschränken den Verkauf dieses Produkts nur an einen Zahnarzt (bzw. entsprechend zugelassenes Personal) oder auf dessen Anordnung.

	Nicht wiederverwenden		Verwenden bis YYYY-MM-DD oder YYYY-MM
	Chargennummer		Hersteller
	Durch Bestrahlung sterilisiert		Symbol für "Unsteril"
	Symbol für "Rezeptpflichtig"		Achtung: Begleitdokumente zu Rate ziehen
	Symbol für "Europäische Konformität"		Bestellnummer
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Union		

Vertrieb durch:

SternGold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 or
+1.508.226.5660



Made in Germany

Europäische Vertretung:
indigodental GmbH
Fahltskamp 5, 25421
Pinneberg, Germany
Ph: +49 (0) 4101 86 86 8-312
Fax: +49 (0) 4101 86 86 70
Email: european.rep@indigodental.com

