



# Instructions for Use for Gingival Reproduction Material

ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE USO

InstaGums®, material de tejido blando pero de gran resistencia, se puede aplicar directamente desde su cartucho de mezcla automática. Las siliconas autopolimerizables hacen que la aplicación sea rápida y sencilla y que se pierda muy poco material.

### Aplicaciones

Zonas de tejidos blandos alrededor de los abutments o de las coronas que simulan el contorno de tejido natural.

### Procedimiento

#### 1. Preparación de la impresión

Si se va a usar InstaGums® con un caso de implantes, se debe fijar convenientemente en la impresión un análogo al coping de impresión. Si se usa en una impresión de captación de coronas, se debe montar y sellar un molde en las coronas. Si hay impresiones de dientes adyacentes, deben aislarse con una cera suave adhesiva. Con esto se evitará que InstaGums® se extienda por las áreas de la impresión y se hará más fácil el recorte de acabado. Dado que es un material de silicona, InstaGums® puede adherirse ligeramente a algunos materiales de polivinilo o a otros materiales de impresión de silicona. Un ligero rociado con un Teflon/silicona seco o una fina capa de vaselina evitará adherencias. InstaGums® no se adhiere a impresiones de poliéster.

#### 2. Aplicación de InstaGums®

Inserte el cartucho en el dispensador 1:1 habitual (p.ej. para materiales de impresión) y retire la tapa protectora del cartucho. La primera vez que se use un cartucho se debe comprobar que el material fluya por ambas boquillas. Después de fijar una cánula nueva, se puede aplicar InstaGums® directamente tirando la empuñadura del dispensador. Aplique InstaGums® en la impresión por toda la zona de la coping de impresión expuesta o por todo el margen de la corona. Extienda el material unos milímetros por encima del lateral del análogo o del molde. Así se podrá estar seguro de que la parte de tejido tiene el grosor suficiente para permanecer fijada en el modelo, incluso cuando se retire la coping de impresión o la corona de la impresión. Con InstaGums® debería obtenerse un grosor de unos 4 ó 5 mm para que se pueda retirar y sustituir sin romperse. El tiempo de aplicación total (incluido el mezclado) de InstaGums® es de 1:45 minutos. Deje que el material fragüe completamente. El tiempo de fraguado total (incluido el mezclado) es de 15 minutos. Deje la cánula montada en el cartucho a modo de tapón hasta que se vuelva a usar el material.

#### 3. Recorte de acabado

El exceso de material se elimina con un escalpelo. Recorte los lados mesial y distal del material fraguado de modo que queden laterales planos aproximadamente verticales. La escayola del modelo encajará con estas paredes verticales y servirá de guía para fijar InstaGums® en el modelo, con lo que se facilitará la extracción y la reinserción del material. Si alguna parte del material se extendiera hasta alguna impresión dental adyacente, retírela.

#### 4. Creación del molde de escayola-piedra

Vierta la escayola-piedra en la impresión de forma normal y déjela fraguar. Retire la impresión. InstaGums® se puede separar de la escayola-piedra mediante simple presión con los dedos o con un instrumento romo hasta que se vea la línea final del implante o el margen de la corona. Vuelva a colocarlo con una simple presión de los dedos o con ayuda de un instrumento romo.

### Composición

Silicona de vinilo, silicona de hidrógeno, aerosil, aditivos, catalizador de platino

### Contraindicaciones

InstaGums® no debe usarse si se tiene alergia a alguno de los componentes.

### Datos técnicos

Tiempo de aplicación (incl. mezclado) 1:45 minutos

Tiempo de fraguado (incl. mezclado) 15 minutos

Tiempos calculados a temperatura ambiente (23 °C).

### Presentación

InstaGums® – 1 cartucho de 50 ml de pasta, 15 cánulas de mezclado, 15 cánulas intraorales REF 222025

Diseñado exclusivamente para uso en laboratorio. No se debe usar en pacientes.

Symbol	Used For	Symbol	Used For
	Representante autorizado en la comunidad europea		Fecha de vencimiento YYYY-MM-DD o YYYY-MM
	Código de lote		Fabricante

Symbol	Used For	Symbol	Used For
	Símbolo para "Uso exclusivo con receta médica"		Atención, consulte los documentos adjuntos
	Símbolo de "Conformidad europea"		Número de catálogo

Fabricado en Alemania para:

**Sterngold**  
Sterngold Dental, LLC  
23 Frank Mossberg Drive  
Attleboro, MA 02703  
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660



European Representative:

indigodental GmbH  
Fahltskamp 5, 25421  
Pinneberg, Germany  
Ph: +49 (0) 4101 86 86 8-312  
Fax: +49 (0) 4101 86 86 70  
Email: european.rep@indigodental.com

