



Instructions for Use for Gingival Reproduction Material

FRENCH

MODE D'EMPLOI

InstaGums®, matériau reproduisant les tissus mous très résistant, il peut être appliqué directement à partir de la cartouche de mélange automatique. Les silicones autopolymérisables rendent l'application rapide et simple avec très peu de perte de matériau.

Applications

Zones de tissus mous autour des implants ou des couronnes qui simulent l'entourage du tissu naturel.

Procédure

1. Préparation de l'empreinte

Dans le cas où InstaGums® va être utilisé sur un modèle de prothèse implantaire on positionnera d'abord l'analogue d'implant dans l'empreinte. Si il est utilisé dans une empreinte de couronne, on positionnera en bonne place le die dans l'empreinte. S'il existe des empreintes de dents adjacentes, elles doivent être isolées à l'aide de cire molle. Ainsi, on évitera qu'InstaGums® ne s'étende sur les surfaces de l'empreinte et la découpe des finitions sera plus facile. Etant donné qu'il s'agit d'un matériau de silicone, InstaGums® peut adhérer légèrement à certains matériaux en polyvinyle ou à d'autres matériaux d'empreinte en silicone. Une légère vaporisation de téflon/silicone sec ou une fine couche de vaseline empêchera ces adhérences.

InstaGums® n'adhère pas à des empreintes en polyéthère.

2. Application d'InstaGums®

Insérer la cartouche dans le distributeur 1:1 habituel (par exemple pour les matériaux d'impression) et retirer le bouchon protecteur de la cartouche. Lors d'une première utilisation d'une cartouche, on doit vérifier que le matériau coule bien par les deux tubes de sortie. Après avoir fixé une nouvelle canule, on peut appliquer directement InstaGums®. Appliquez InstaGums® autour de toute la zone exposée de l'analogue ou du bord cervical de la couronne. Déposer le matériau sur quelques millimètres d'épaisseur. Ainsi la partie de tissu aura certainement l'épaisseur suffisante 4-5 mm pour rester fixée au modèle ceci lors une étape de désinsertion du transfert d'implant ou de la couronne. Avec InstaGums® on doit obtenir une épaisseur de 4 ou 5 mm environ pour afin de pouvoir le retirer et la repositionner sans le casser. Le temps d'application (mélange inclus) d'InstaGums® est de 1.45 minutes. Attendez que la prise du matériau soit complète. Le temps de prise total (mélange inclus) est de 15 minutes. En guise de bouchon, laissez la canule insérée sur la cartouche jusqu'à une prochaine utilisation du matériau.

3. Découpe de la finition

L'excédent de matériau est éliminé avec un scalpel. Découpez les faces mésiales et distales du matériau après prise, de façon à ce que les faces latérales soient plates et approximativement verticales. Le plâtre du modèle s'emboîtera dans ces parois verticales et servira de guide pour fixer InstaGums® sur le modèle, ce qui facilitera l'extraction et le repositionnement du matériau. Si une partie du matériau débordait sur les dents adjacentes, retirer ce matériau.

4. Création du moule en de plâtre-pierre

Versez normalement le plâtre-pierre dans l'empreinte et attendez jusqu'à ce que la prise soit complète. Retirez l'empreinte. InstaGums® peut être séparé du plâtre-pierre par une simple pression des doigts ou à l'aide d'un instrument émoussé jusqu'à ce que l'on puisse voir la ligne de finition de l'implant ou le bord de la couronne soit visible. Réinsérez InstaGums® par une simple pression des doigts ou à l'aide d'un instrument émoussé.

Composition

Silicone de vinyle, silicone hydrogénée, aérosil, additifs, catalyseurs en platine.

Contre-indications

InstaGums® ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à un de ses composants.

Données techniques

Temps d'application (incl. mélange) 1:45 minutes

Temps de prise (incl. mélange) 15 minutes

Temps calculés à température ambiante (23 °C).

Présentation

InstaGums® – 1 cartouche de 50 ml de pâte, 15 canules de mélange, 15 canules intra-oraux REF 222025

Produit réservé à l'usage conçu exclusivement pour une utilisation en laboratoire.

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Code de lot		Fabricant
	Uniquement sur ordonnance		Attention, consulter la documentation jointe
	Communauté européenne		Numéro de catalogue

Fabriqué en Allemagne pour:



Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660



European Representative:

indigodental GmbH
Fahltskamp 5, 25421
Pinneberg, Germany
Ph: +49 (0) 4101 86 86 8-312

Fax: +49 (0) 4101 86 86 70

Email: european.rep@indigodental.com



Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Mandataire dans la Communauté européenne		Utiliser avant le YYYY-MM-DD ou YYYY-MM